

Hurry Cane

取扱説明書

この度は、drive 製杖をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をお読みになり、本製品を正しく安全にお使い下さい。また必ず、保管するようにしてください。

※本取扱説明書（保証欄）は日本国内でのみ有効です。※

この杖は、杖なしで自立歩行ができる方が、より安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。杖なしで歩行できない方の使用には適していません。

ご使用前に



■標準的な杖の長さの合わせ方

握り（グリップ）の位置を決めるには、杖先を杖の持ち手と同じ足先の前 20cm に置き、肘が 30 ～ 40 度曲がるように高さを決めてください。（左図参照）

<一般的な杖の長さ設定は、『身長 ÷ 2 + 3 cm』と言われてます>

例) 身長 160cm の場合

$$160 (\text{身長}) \div 2 + 3 \text{ cm} = 83 \text{ cm}$$

病院等で、医師、理学療法士、専門家のアドバイスを受けて調整してください。

使用上の注意

- ・棒状つえは、杖なしで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。
▲杖なしで歩行できない方には適していません。手すりに伝わらなければ歩行できない方や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方の使用が含まれます。
▲リハビリ中など体重の一部を支えないと歩行できない方には適していません。ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません。
- ・身体に合った杖をお選びください。不適切な長さのまま使用すると事故等の原因になります。
- ・ご使用前に各部分を点検しご使用ください。
- ・杖先ゴムは、消耗品ですので摩耗や劣化が見られた場合は、早めに交換して下さい。
- ・使用中も含め、支柱の継ぎ目や長さ調整部が確実に固定されている事を確認してご使用ください。
- ・濡れた路面、凍った路面では滑りやすいので注意して下さい。
- ・道路の側溝の溝や凹みがある場所では、杖先がはまり込む恐れがあるので十分注意して下さい。
- ・握り先端部に過大な力をかけるようなご使用はしないで下さい。
- ・杖としての歩行補助以外の用途では使用しないで下さい。
- ・折りたたみ式杖にあっては、高温の場所はゴムロープが劣化しやすくなるため避けてください。また低温の場所では、折りたたんだ状態からすぐにゴムロープの弾性が回復しないことがあるのでご注意ください。
- ・ゴムロープに緩み、損傷等の異状があるときは製造メーカー等に相談してください。



製品安全協会 SG 合格品

SG マーク表示された杖は安心してお使いいただけます。

SG マーク制度は、SG マーク付き杖の欠陥により発生した、人身事故に対する賠償制度です。但し、SG マーク表示の有効期限は 3 年間です。

■賠償についてのご注意点

- ・杖そのものが、故障しても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害など身体的な損害について保証する制度です。
- ・生産物賠償責任保険の保険金は、それぞれ実情をよく調査して、身体的な損害（人的損害）について賠償することになります。


■SG マーク付、杖の欠陥により日本国内で事故が起きた場合、事故発生後すぐに製品安全協会にお電話して下さい。

※原則として、被害を受けられた方からのお申し出となります。

<連絡先>

一般財団法人 製品安全協会 TEL. 03-5808-3303

各部名称

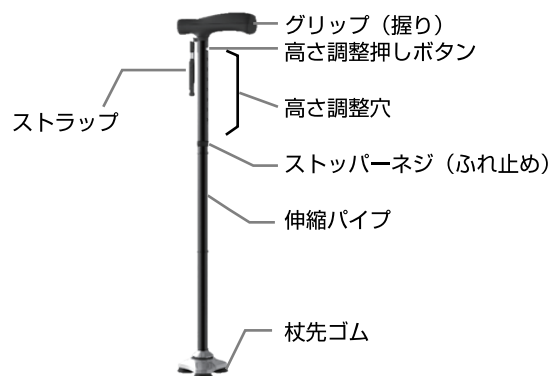

製品仕様

製品名称	Hurry Cane / BK・RD・BL・PR 共通
全長	77～95cm(8段階)
パイプ径	19mm
耐荷重	100kg
質量	460g
杖先ゴム径	37mm
材質	グリップ：PP、TPR パイプ：アルミニウム 杖先ゴム：TPR

※1. 仕様については予告なく変更する場合がございます。
ご了承ください。

※2. 寸法については、多少のバラツキがございます。

長さ調整


1. ストッパーネジを反時計方向に回し緩めます。




2. 高さ調整押しボタンを指で押し、伸縮パイプをスライドさせ長さを調整します。



3. 高さ調整押しボタンが、「カチッ」と音がして調整穴から出ていることを確認してください。

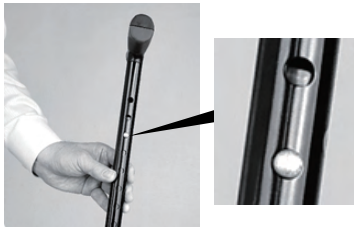

4. ストッパーネジを時計方向に回し、固定してください。

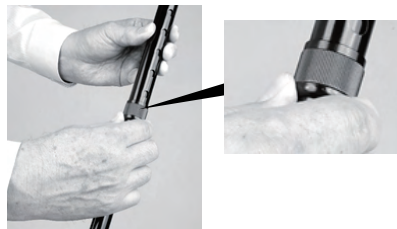

保証規定

お買上げの杖を正常な取扱い中に製造上の不良、不具合が生じた場合は、無料で修理いたします。(ご購入後、1年間)

●本製品には保証書はついていません。修理の際はご購入店と購入日が明記されている領収書やレシートを添付のうえ、ご購入店または、当社までお申し付けください。

<保証適用外>

・ご購入店の領収書、レシートまたは、納品書が、未添付の場合は、無償修理の対象外となります。

・正常な取扱い中に起きた故障以外は、有料修理となります。(下記①～⑤)

①取扱説明書に記載の使用方法、注意に反する取扱によって生じた故障。

②保管上の不備のため生じた故障 (高温多湿の場所での保管による劣化)

③火災・天災・地震などによる故障。

④使用上の誤りや不当な修理・改造・分解による故障。

⑤消耗品の摩耗・劣化・ケース・杖先ゴム・グリップ・ストラップは、保証の対象とはなりません。

お客様相談窓口

drive 製品についてのお問い合わせは下記の連絡先までお願いします

ケンコー・トキナーお客様相談室

TEL 0120-775-818 (フリーコール無料)

【携帯／PHS／IP 電話をご使用のお客様】03-6840-3389 (有料)

受付時間：平日 9:15～17:30

(土曜・日曜・祝日・年末年始・夏期休業日等を除く)

販売元：株式会社 ケンコー・トキナー

〒164-8616 東京都中野区中野 5-68-10